

Link do produktu: <https://beticosmetics.pl/hairplay-trzonek-uchwyt-do-ostrza-skalpela-tk01-14-rozm4-p-10259.html>



## Hairplay Trzonek (uchwyt) do ostrza skalpela TK01-14 rozm.4

Cena	<b>29,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>2223-TUDOS4</b>
Kod EAN	<b>5903849662925</b>

### Opis produktu

Trzonek do skalpela nr 4 Hairplay dedykowany do ostrzy w rozmiarze od 18 do 36.

**Hairplay trzonek do skalpela** nr 4 bardzo dobrej jakości, często stosowany w profesjonalnych gabinetach podologicznych. Uchwyt doskonale pasuje do ostrzy w rozmiarze od 18 do 36 tworząc skalpel (łączy się poprzez zatrzask). Odpowiedni kształt trzonka sprawia, że praca z jego zastosowaniem jest bardzo precyzyjna oraz komfortowa. **Trzonek do skalpela** nr 4 w całości wykonano z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a to z kolei sprawia, że może być on zarówno dezynfekowany jak i sterylizowany w autoklawie parowym.

### Trzonek do skalpela Hairplay nr 4 - charakterystyka

- całkowita długość narzędzia: 14 cm,
- odpowiedni do ostrzy w rozmiarach **od 18 do 36**,
- delikatnie zaokrąglone brzegi poprawiają komfort pracy
- wygodne w użytkowaniu mocowanie ostrza,
- wysokiej jakości stal nierdzewna,
- ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia wygodną pracę,
- posiada certyfikat CE.

### Trzonki do skalpela - rodzaje:

- [trzonek nr 3](#)
- **trzonek nr 4**

### Jak dezynfekować i sterylizować uchwyty do skalpela?

Wszystkie narzędzia podologiczne wielorazowego użytku po zastosowaniu należy dokładnie umyć, zdezynfekować oraz wysterylizować. Narzędzia po ukończonej pracy muszą zostać umyte pod bieżącą wodą. Następny etap stanowi proces dezynfekcji z zastosowaniem myjki ultradźwiękowej z uprzednio rozpuszczonym w niej płynem o właściwościach bójczych. Po zakończonej dezynfekcji, narzędzia należy dokładnie osuszyć i zapakować w pakiety do sterylizacji. Sterylizację prowadzić z zastosowaniem autoklawu parowego w temperaturze 134° C przez minimum 15 minut. Po tym **etapie trzonek do skalpela** nadaje się do ponownego użytku w gabinecie podologicznym.